



Disposable Medical Devices

www.omniaspa.eu - info@omniaspa.eu

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL CARRELLO PORTASTRUMENTI 30.E0026

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE INSTRUMENT TROLLEY 30.E0026

Contenuto
Content

Nome
Name



Piantana telescopica | Telescopic tube



Piede con ruote | Foot with revolving wheel



Telaio | Frame



Vassoio | Tray



Chiave a brugola grande | Big hex key



Chiave a brugola piccola | Small hex key



Federa di Mayo 80x120 cm | Mayo drape 80x120 cm

Omnia trademarks:

Surgical Line


Safety Line

MAXIL

OMNIAPharma

EssentialLine
by Omnia

Montaggio | Assembly

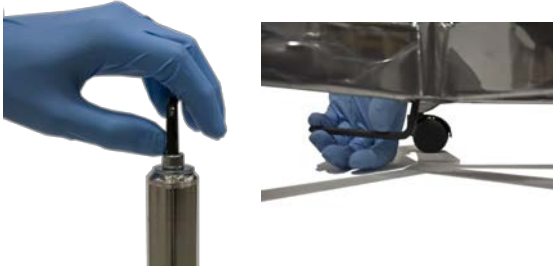

1

Svitare la vite in fondo alla piantana con la chiave a brugola grande. Alloggiare la piantata sul piede con ruote e riavvitare la vite.

Unscrew the screw at the bottom of the telescopic tube with the big hex key. Place the tube on the foot and screw it.



2

Dopo aver allineato il telaio con i fori, avvitare le viti dall'alto con la chiave a brugola piccola tenendo il dado al di sotto del telaio per assicurarne la stabilità.

After aligning the frame with the holes, screwing the screws from above with the small hex key keeping the nut below the frame to ensure stability.



3

Appoggiare il vassoio sul telaio per completare il tavolo.

E' compresa la fornitura di una federa di Mayo 80x120 cm (REF. 12.A1010).

E' possibile regolare l'altezza attraverso il pomello sulla piantana telescopica.

Place the tray on the frame to complete the table.

In every table a Mayo's drape 80x120 cm (REF. 12.A1010).

It's possible to set the height of the instrument trolley through the plastic handle on the telescopic tube

Omnia trademarks:

Surgical Line

Safety Line

MAXIL

OMNIPharma

Essential line
by Omnia